

Instalación del programa A-Scan Plus Connect en Windows 8

INSTALACIÓN – PRIMERA FASE:

La primera fase es la misma para sistemas operativos Windows 8 64 bit y 32 bit

Desactive los controles de Cuentas del Usuario (User Account Controls)

- Desde la pantalla “tile”, escriba “control” en cualquier lugar de la pantalla y seleccione **Panel de Control (Control Panel)**

- Seleccione **Cuentas de Usuario y Seguridad Familiar (User Accounts and Family Safety)**.

Nota: dependiendo de la configuración del computador, puede ser que no aparezca esta selección de “Cuentas de Usuario y Seguridad Familiar”.



- Seleccione **Cuentas de Usuario (User Accounts)**



- Seleccione **Cambiar Configuración de Usuario Cuentas (Change User Control Settings)**



Control de Account

- Arrastre la barra a **Nunca (Never Notify)**




Notificar

Instalación del programa A-Scan Plus Connect en Windows 8

Cambie la configuración del PC

- Desde la pantalla “tile”, mueva el cursor sobre el signo menos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Un menú lateral aparece, haga clic en la última opción que será el icono del menú de **Configuración (Settings)**
- Seleccione el recuadro de **Cambiar Configuración del PC (Change PC Settings)** en la esquina inferior derecha.
- Seleccione el recuadro de **General** a la izquierda del menú

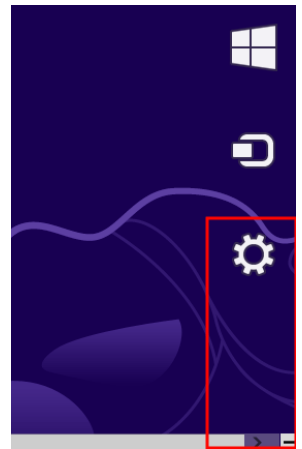

○ Deslice la pantalla derecha hasta el final inferior donde aparecerá la opción de **Remove everything**

If you want to recycle your PC or settings.

Get started

Advanced startup

Start up from a device or disc (such as startup settings), or restore Windows

Restart now

Share

General

Privacy

Devices

Wireless



Ease of Access

Configuración Avanzada (Advanced Setup)

- Bajo la pantalla de Configuración Avanzada haga clic en **Reiniciar Ahora (Restart Now)**


Reinicie Pantalla

- Seleccione el recuadro **Solucionar Problemas (Troubleshoot)**
 - En el menú Solucionar Problemas (Troubleshoot) seleccione **Opciones Avanzadas (Advanced options)**

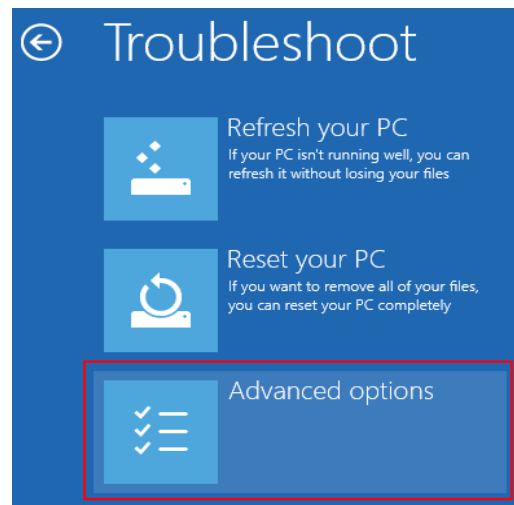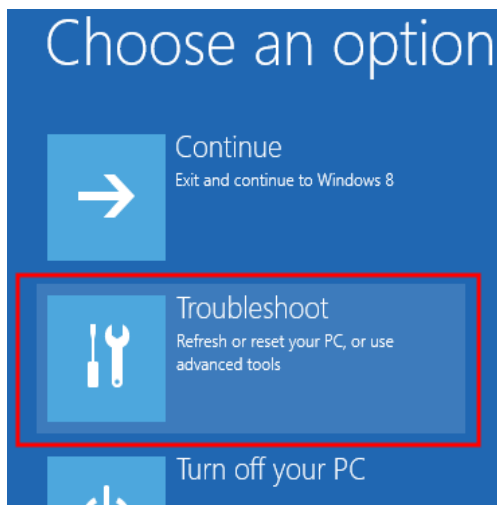


Instalación del programa A-Scan Plus Connect en Windows 8


- Seleccione **Configuración de Inicio (Startup Settings)**

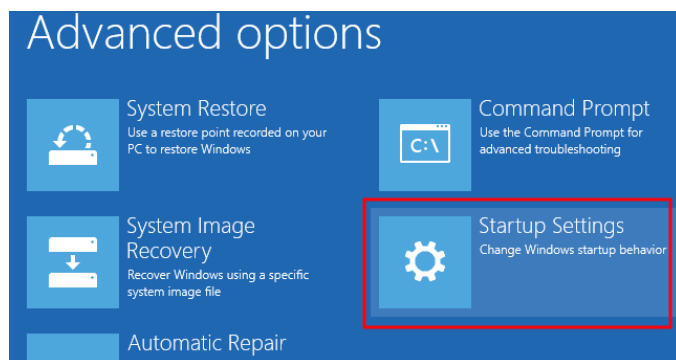

- Bajo Configuración de Inicio (Startup Settings) seleccione el recuadro **Reiniciar (Restart)** en la esquina inferior derecha.

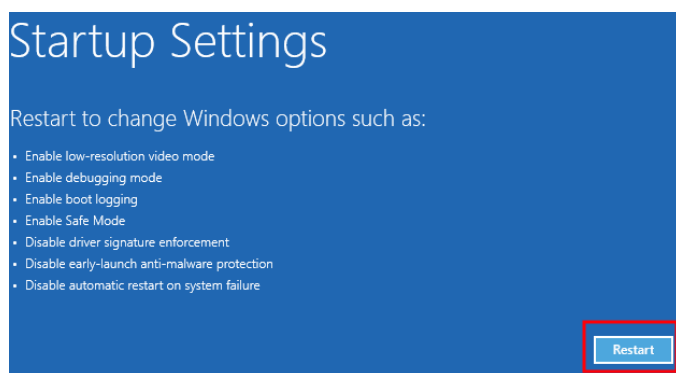

- En la siguiente pantalla seleccione **Deshabilitar Controlador de Firma (Disable Driver Signature Enforcement - DSE)** presionando la tecla **7** o **F7**. Esto reiniciara el computador con los controles DSE deshabilitados.

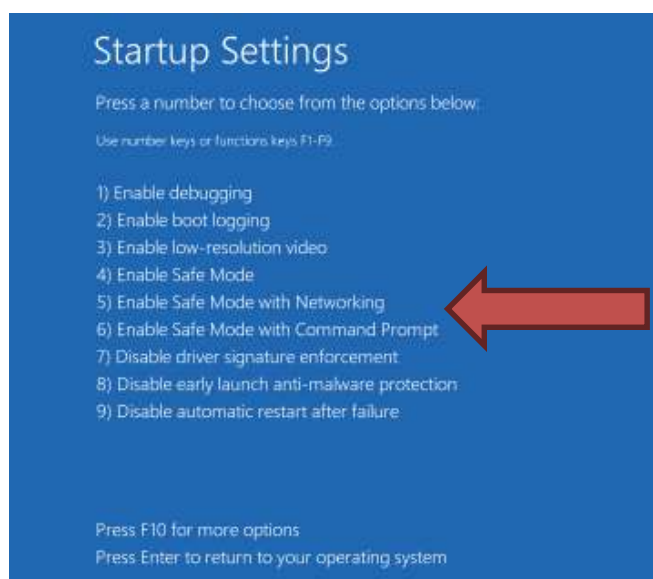

Instalación del programa A-Scan Plus Connect en Windows 8

Ejecutar como administrador

- Una vez que el computador se haya reiniciado después que el Controlador de Firma haya sido desactivado, abra **Mi PC (My Computer)**.
 - Haga clic derecho sobre el disco del programa “Accutome A-Scan Plus Connect” y seleccione **abrir (Open)**
 - Haga clic derecho sobre **Configuración (Setup)** y seleccione **Ejecutar Como Administrador (Run as Administrator)**




Instalación del programa A-Scan Plus Connect en Windows 8

INSTALACIÓN – SEGUNDA FASE para sistemas operativos Windows 8 (64 bit):

Siga los siguientes pasos para instalar la aplicación del "Accutome A-Scan Plus Connect":

1. La ventana **WinZip Self -Extractor - gs900w32.exe** aparecerá en el escritorio al final de la instalación . Si no aparece automáticamente, haga doble clic en el icono de **"Launch gs900win32.exe"** en el escritorio para instalar **Ghostscript 9.00** manualmente.

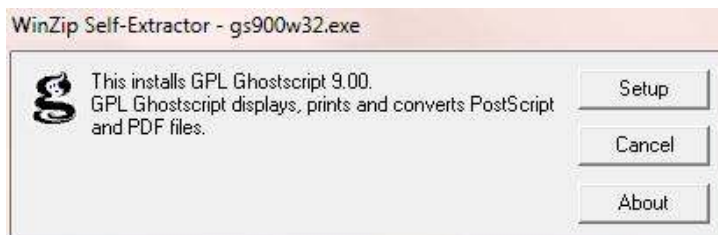

2. Haga clic en **"Configuración" (Setup)** y luego haga clic en **"Instalar" (Install)** para iniciar la instalación de Ghostscript.
3. Haga clic en **"Finalizar" (Finish)** para cerrar la ventana de **Install Accutome A- Scan Plus Connect** y completar los pasos de instalación para los archivos necesarios y controladores de dispositivos para ejecutar aplicaciones.

TERCERA FASE Instale el controlador de dispositivo de la unidad de control


Instalación de la Unidad de Control

1. Conecte el cable USB tipo B a la parte posterior de la unidad de control.
2. Conecte el cable USB tipo A, a cualquier puerto USB de la PC.




Instalación del programa A-Scan Plus Connect en Windows 8

3. Windows cargara el controlador de dispositivo para la Unidad de Control. Si el Driver es encontrado, una ventana aparecerá en el escritorio.

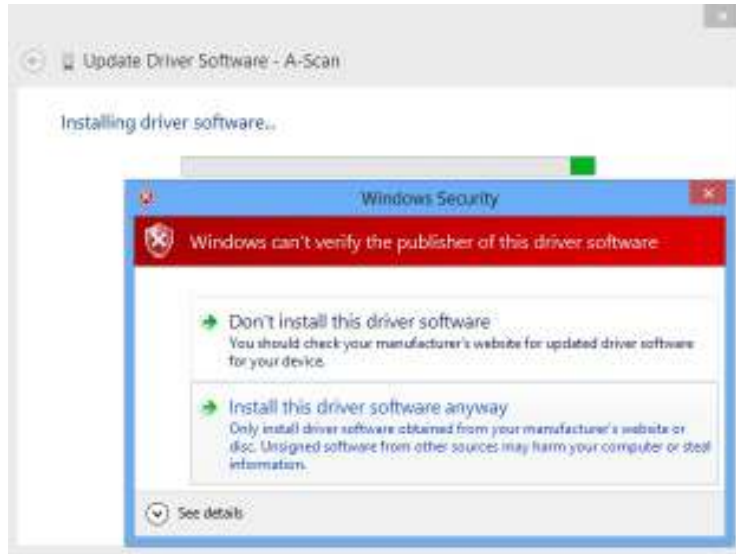

4. Haga clic en **“Instale el software del controlador de todas formas” (Install this driver software anyway)** para instalar el controlador. Cuando haya terminado, el siguiente mensaje aparecerá.

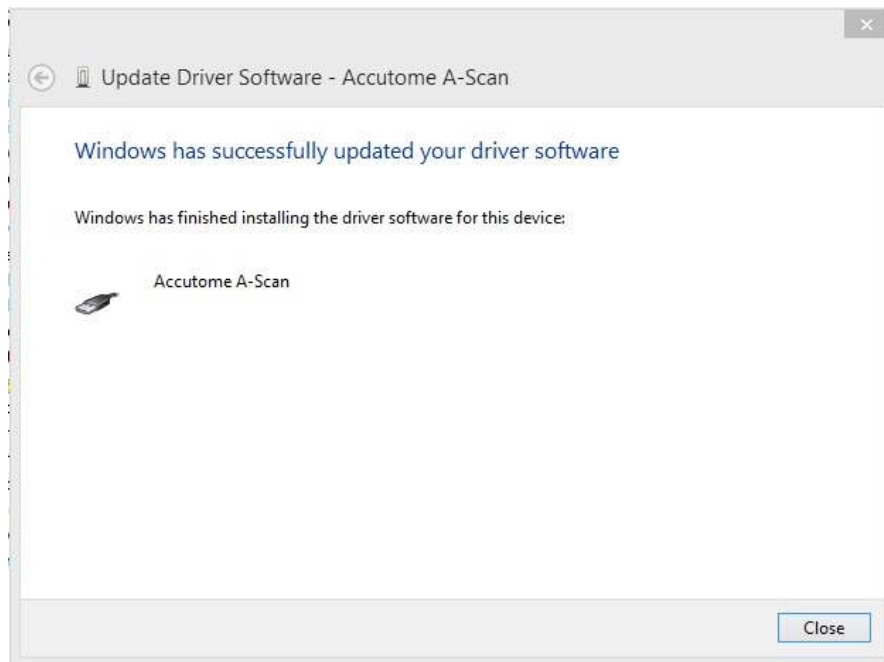


La luz LED del A-scan cambiará de rojo a amarillo. Y si se conecta la sonda, la luz LED se iluminará en verde.

Instalación del programa A-Scan Plus Connect en Windows 8

NOTA:

Si la ventana "Actualizar controlador Accutome A- Scan" (Update Driver Software – Accutome A-Scan) no aparece automáticamente, abra el manualmente la carpeta del "Administrador de dispositivos" (Device Manager) en el "Panel de control" (Control Panel) y haga lo siguiente:

- Haga clic derecho en "A- Scan" y seleccione "Actualizar software de controlador" (Update Driver Software).

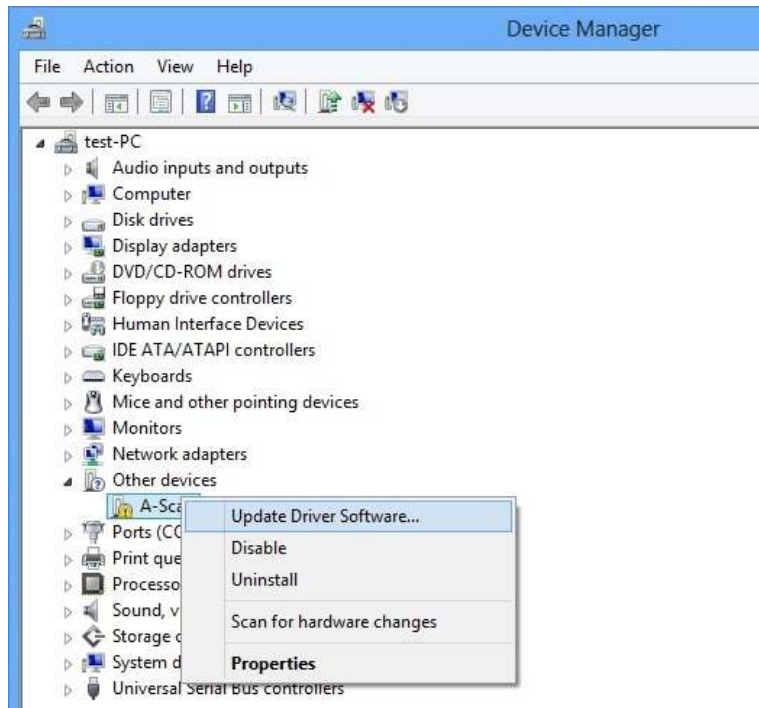

- Siga los pasos indicados anteriormente desde el paso 3 de la Tercera Fase para instalar el controlador.